



Vivre en toute autonomie chez moi

MUTAIN et la MONTRE CONNECTEE
GALAXY WATCH – DOMO GO

Téléassistance itinérante

Où je veux,
quand je veux...



Montre domo.go

- ❖ Alarme déclenchée en appuyant sur le bouton supérieur
- ❖ Un compte à rebours de 10 secondes s'affiche (le client peut annuler).
- ❖ Curena rappelle directement sur la montre.
- ❖ La centrale d'urgence peut envoyer la position à l'ambulance ou aux proches.
- ❖ Pendant qu'on l'a portée, la montre mesure le nombre de pas et la fréquence cardiaque.

L'app domo.health

- ❖ En cas d'urgence, les contacts recevront la position GPS et un message de Curena dans le chat en direct.
- ❖ Les données de santé (nombre de pas / fréquence cardiaque) sont consolidées sous forme de graphiques.
- ❖ Ces données peuvent être partagées avec les proches ou les professionnels de la santé en cas de besoin.



Caractéristiques de la domo.go

- ❖ Colori noir
- ❖ Diamètre 40 mm ou 44 mm
- ❖ Touchscreen
- ❖ Détecteur de chute
- ❖ Haut parleur + micro
- ❖ Localisation GPS précise
- ❖ Bracelet anti allergène
- ❖ Notifications de la fréquence cardiaque
- ❖ Nouveau Touchscreen en verre de saphir
- ❖ Comprend : montre, chargeur magnétique, adaptateur USB-C, guide de démarrage rapide
- ❖ Compatible avec iOS et Android (avec l'application domo.health en mode autonome)
- ❖ Carte E-SIM Swisscom intégrée
- ❖ Haut-parleur + microphone
Disponible en design CRS




Affichage dans l'app domo.health

- ❖ Données de santé récoltées durant la journée avec la montre
- ❖ Données de santé récoltées durant la nuit grâce au couplage avec d'autres systèmes domo.health (par ex. domo.night).
- ❖ Etat de charge : l'utilisateur reçoit un message dans l'application domo.health lorsque la montre est presque déchargée.
- ❖ Notifications sur le cadran de la montre



Comment fonctionne l'app domo.health?

- ❖ Les contacts d'urgences sont ajoutés.
- ❖ Les contacts reçoivent un message les invitant à télécharger l'app domo.health
- ❖ Une alarme peut maintenant être envoyée via l'app domo.health
- ❖ L'alarme est envoyée à ses contacts
- ❖ Les contacts sont informés dans le chat de l'app en direct et peuvent rappeler sur le téléphone mobile
- ❖ Fonctions complètes après 24 heures

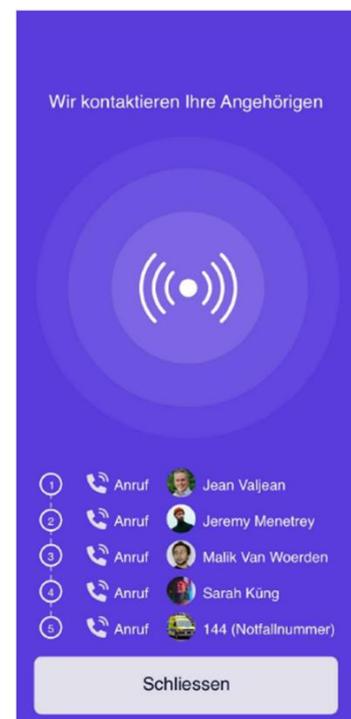

Le meilleur choix – domo.go

- ❖ Un système Suisse avec stockage des données en Suisse.
- ❖ Possible d'utiliser la montre de manière autonome (sans téléphone) : la personne peut se promener sans téléphone et consulter plus tard ses données de santé sur son téléphone
- ❖ Facile à utiliser : les graphiques de l'application sont très intuitifs
- ❖ Possible de partager des données avec des proches et des professionnels de la santé pour une meilleure prise en charge
- ❖ Possible d'ajouter d'autres systèmes domo.health pour une prise en charge améliorée de la santé et de la sécurité



✓ POUR QUI ?

- Pour toutes les personnes qui souhaitent :
 - vivre en toute liberté sans inquiéter leurs proches
 - pouvoir alerter rapidement les secours en cas d'urgence (malaise, chute, accident...).




✓ AVANTAGES

- Fonctions d'une montre connectée (fréquence cardiaque et respiratoire, nombre de pas), avec bouton d'alerte et géolocalisation. En outre il est possible de consulter les données via l'application.
- Faciliter d'utilisation pour déclencher l'alerte géolocalisée.
- Centre d'écoute accessible 24h/24 et 7j/7.



✓ MISE EN SERVICE

- La montre connectée fonctionne avec un abonnement compris pour recevoir les appels téléphoniques et déclencher une alerte d'urgence auprès du centre d'écoute de MUTAIN.
- Autonomie de 15 h 00.
- Un chargeur à induction, simple d'utilisation.
- Le service technique MUTAIN, vous accompagne pour la mise en service, 5j/7.

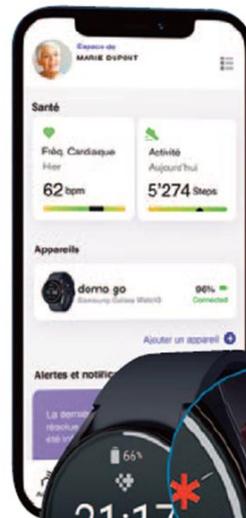

Charte éthique

La Charte éthique a pour objet de poser les principes fondamentaux applicables à une structure agréée de Téléassistance de Proximité, de définir les critères de gestion d'une telle structure, et de renforcer et dynamiser ses actions dans le respect des valeurs qu'elle défend.

Cette Charte est un référentiel qui implique ses acteurs et institue un code de bonne conduite que le Service de Téléassistance MUTAIN s'engage à respecter, à affirmer, à partager et à pérenniser.

CET ENGAGEMENT CONSISTE À :

- Avoir une image de marque, obtenue par l'expérience, le savoir-faire, la proximité du service ;
- Disposer d'une écoute de proximité personnalisée, directe et fiable, de jour comme de nuit, tant au point de vue relationnel que médical, étayée par une plateforme d'écoute locale ;
- Assurer la qualité du service par une application suivie des technologies nouvelles, la compétence et la disponibilité des acteurs ;
- Mutualiser et harmoniser les moyens d'action relatifs, notamment, aux cotisations des bénéficiaires du service MUTAIN ;
- Optimiser la communication et l'information publique et privée ;
- Maintenir un lien social pour l'accompagnement, le réconfort et le développement de la sécurité médico-sociale des bénéficiaires, en liaison avec les services sociaux locaux.

Le mouvement mutualiste s'est développé au 19^e siècle autour des valeurs de solidarité, de liberté, de démocratie et de responsabilité, à l'initiative des citoyens unis face aux difficultés de la vie quotidienne. Issue de ce mouvement, la Mutualité Française est aujourd'hui le premier acteur de prévention et de promotion de la santé après l'État et l'Assurance Maladie et porte ces mêmes valeurs. Créé en 1988, MUTAIN est le service de Téléassistance de Mutualité Française Ain – Services de Soins et d'Accompagnement Mutualistes.